

# cara Print CAM Software – Shortcuts (1/2)

## Allgemeine Shortcuts

**Ctrl** + **A** = einfügen  
**Ctrl** + **Z** = rückgängig  
**Ctrl** + **Y** = wiederherstellen

**Ctrl** + **D** = kopieren  
**F1** = Was ist das?  
**del** = entfernen


## Kombinationen zum Ansichtswechsel

**Ctrl** + **1** = Mitte  
**Ctrl** + **2** = Oben  
**Ctrl** + **3** = Vorne

**Ctrl** + **4** = Rechts  
**Ctrl** + **5** = Links  
**Ctrl** + **6** = Unten


## Softwarebefehle zur Modellausrichtung- und bewegung

### Bewegen:


 = Modell in der x- und y-Ebene bewegen

 + **Shift** = Modell in der z-Ebene bewegen

### Drehen:

 = Modell um die z-Achse drehen

### Ausrichten:

 = Modell um die x- und y-Achse drehen

 + **Ctrl** = Modell nur um die y-Achse drehen

 + **Shift** = Modell nur um die x-Achse drehen

# cara Print CAM Software – Shortcuts (2/2)

## Supportbezogene Befehle

**Ctrl** + **↑ Shift** + **A** = Support hinzufügen

**Ctrl** + **↑ Shift** + **D** = Support entfernen

**Ctrl** + **↑ Shift** + **M** = Support ändern

## Support Oben:

 = Position oben ändern

 + **↑ Shift** = Winkel oben ändern

 + **Ctrl** = Länge oben ändern

## Support Mitte:


 = Position oben ändern

 + **↑ Shift** = Winkel oben ändern

 + **Ctrl** = Supportstärke ändern

## Support Bauplattform:

 = Position unten ändern

 + **↑ Shift** = (gegebenenfalls) Winkel unten ändern

 + **Ctrl** = Stärke/Höhe unten ändern

### Kontakt in Deutschland

Kulzer GmbH  
Leipziger Straße 2  
63450 Hanau, Deutschland  
cara-service@kulzer-dental.com